

AVENTAL CIRÚRGICO OFTMED

DESCRIÇÃO

O **AVENTAL CIRÚRGICO OFTMED** é um artigo médico hospitalar fabricado em tecido não tecido, com fechamento na parte de trás, mangas longas, com duas tiras como cinto e esterilizado por óxido de etileno ou raios gama, embalado unitariamente em embalagem de papel grau cirúrgico termoselada com filme polimérico.

COMPOSIÇÃO

Avental Cirúrgico – Tecido não tecido formado por fibras de polipropileno 100%, gramatura 30g/m² e 45g/m².

MODELOS

PP - Muito pequeno

P - Pequeno

M - Médio

G - Grande

GG - Muito grande

FINALIDADE

O **AVENTAL CIRÚRGICO OFTMED** é indicado para uso em cirurgias e em procedimentos em geral, para a proteção do profissional de saúde e do paciente.

VANTAGENS

O uso do **AVENTAL CIRÚRGICO OFTMED** facilita a rotina hospitalar do centro de materiais.

Evita contaminações e previne a disseminação de infecções hospitalares.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Verificar a integridade da embalagem e a data de validade antes de abrir para utilizar o produto.
2. Abrir a embalagem do **AVENTAL CIRÚRGICO OFTMED** o mais próximo possível do momento de seu uso e vestir a si próprio ou o paciente, de acordo com os procedimentos padronizados de saúde.
3. Adaptar ao corpo de modo confortável, cobrindo totalmente a roupa, com a abertura na parte de trás do corpo e amarrar o cinto.

4. Realizar o procedimento.
5. Finalizando o procedimento retirar o avental, descartando em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES

Verificar sempre antes do uso a integridade da embalagem e a data de validade do produto.

Se durante o procedimento, o avental se molhar ou se contaminar por algum tipo de respingo, trocar, imediatamente por um novo.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se a embalagem estiver aberta, molhada ou danificada.

Não reutilizar o avental após o seu uso.

Estéril. Esterilizado por óxido de etileno ou raios gama.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. É PROIBIDO REPROCESSAR.

Conservar em local fresco e seco à temperatura ambiente.

Fabricado por:

Oft Vision Indústria e Comércio Ltda

Rua Imbocuí, 283–Vila Moreira–Tatuapé–São Paulo–SP–CEP: 03088-030

CNPJ: 74.215.013/0001-14 – I.E.: 113.921.713.115 – Indústria Brasileira

Autorização MS Nº M734L7782W3X - Registro Anvisa Nº: 80153650032

Resp. Técnica: Dra. Caroline Teixeira de Barros – CRF/SP Nº 76.207

Sac: +55 (11)2092-7023 www.oftvision.com.br – contato@oftvision.com.br