


# INFORMAÇÕES DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE USO




FABRICADO POR:  
OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
RUA IMBOCUÍ, 279/283 • SÃO PAULO • SP  
CEP: 03088-030 • BRASIL • INDÚSTRIA BRASILEIRA  
CNPJ: 74.215.013/0001-14 • AUT. MS M734L7782W3X  
RESP. TÉCN DRA. CAROLINE TEIXEIRA DE BARROS • CRF/SP 76.207  
SAC: +55 (11) 2092-7023  
SITE: WWW.OFTVISION.COM.BR  
E-MAIL: CONTATO@OFTVISION.COM.BR  
REG. ANVISA: 80153650034

ME216


## BISTURI PARA MICROCIURURGIA OFTÁLMICA

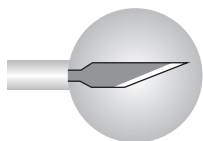


**LANCE TIP KNIFE (15 DEG)**  
INCISÃO INICIAL OU PORTA LATERAL

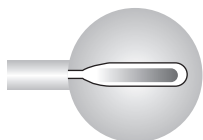


**CRESCENT KNIFE (BEVEL UP)**  
SULCO OU INCISÃO TÚNEL LATERAL

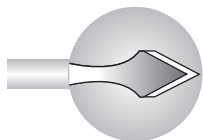

**SLIT KNIFE POINTED TIP (KERATOME)**

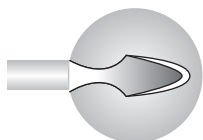

**SLIT KNIFE BLUND TIP (ENLARGER)**  
AMPLIAÇÃO DE INCISÃO

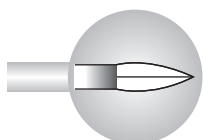

**MVR KNIFE**  
VITRECTOMIA

**Apresentação:**

BISTURI PARA MICROCIRURGIA OFTÁLMICA OFT VISION é apresentado embalado individualmente em envelope grau cirúrgico termoselado ou em blister de cloreto de polivinila (PVC) termoselado com papel grau cirúrgico. A embalagem secundária é um cartucho de cartolina contendo de 01 a 10 unidades.

**Descrição:**

Bisturi para Microcirurgia Oftálmica Oft Vision possui lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, que adota uma tecnologia de processo de afiação química não-abrasiva, propiciando uma lâmina de corte consistente, resultando em incisões sempre precisas e reproduzíveis, sem nenhum repuxamento do tecido e com menor possibilidade de laceração. Este processo cria uma superfície não-reflexiva, sem pontos de fulgor ou brilho que possam atrapalhar a visão.

**Indicações:**

É indicado para todo procedimento cirúrgico oftalmológico que requer precisão no corte dos tecidos oculares. Pode ser utilizado nos mais diversos tipos de cirurgia, tais como facectomia pela técnica de facoemulsificação, intra ou extra-capsular, correção do estrabismo, vitrectomias anteriores e posteriores, cirurgia do glaucoma, transplante de córneas, trabeculectomias, cirurgias para implantes oculares, cirurgias plásticas do olho, descolamento de retina, entre outras.

**Contra-indicações:**

Não apresenta contra-indicações, desde que seja usado para fins específicos.

**Instruções de Uso:**

Remova a embalagem individual de seu respectivo cartucho; Abra a embalagem utilizando técnicas assépticas; Remova com cuidado o Bisturi do berço plástico. O produto está pronto para uso; Descartar após o uso.

**Composição:**

Lâmina: Aço Inoxidável, com processo de afiação química não-abrasiva.

Cabo: Policarbonato.

***Advertência: Este produto somente poderá ser utilizado por profissionais treinados e devidamente habilitados, sendo que o resultado dos procedimentos cirúrgicos depende da perícia e habilidade para com o uso do bisturi e demais produtos utilizados durante a cirurgia.***

**Precauções:**

- Produto estéril de uso único - Não reutilizar ou reesterilizar.
- Não utilizar após o vencimento do prazo de validade.
- Não utilizar se a embalagem apresentar indícios de violação ou deterioração.
- As precauções limitam-se às que normalmente estão associadas ao procedimento que está para ser praticado.

OBS: Oft Vision não assume qualquer responsabilidade por complicações que possam surgir como resultado da reutilização ou uso impróprio do produto.

**Armazenamento:**

Armazenar em local fresco, seco e limpo, longe de vapores orgânicos, à temperatura ambiente e ao abrigo de incidência de luz solar.

Esterilizado por Óxido de Etileno

**CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, À TEMPERATURA AMBIENTE  
E AO ABRIGO DE INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR DIRETA**

**ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. É PROIBIDO REPROCESSAR.**

**CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE: Vide cartucho