

CAMPO CIRÚRGICO OFTMED

DESCRIÇÃO

O **CAMPO CIRÚRGICO OFTMED** é um artigo médico hospitalar é constituído por tecido não tecido em diversos formatos e dimensões, com ou sem janela (abertura), com ou sem adesivo. Modelo impermeável é formado por filme de polietileno de baixa densidade. O CAMPO CIRÚRGICO OFTMED é acondicionado em uma embalagem de papel grau cirúrgico e filme polimérico termoselada. O produto é esterilizado por óxido de etileno ou raios gama.

COMPOSIÇÃO

Tecido não tecido formado por fibras de polipropileno 100%, gramatura 45g/m²

Adesivo – Resina acrílica

MODELOS:

COM JANELA – (0,90 X 0,90)m, (1,00 x 1,00)m, (1,50 x 1,50)m, (1,50 x 1,80)m, (1,50x 2,60)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00)m, (2,00 x 2,00)m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

SEM JANELA – (0,90 x 0,90)m, (1,00 x 1,00)m, (1,50 x 1,50)m, (1,50 x 1,80)m, (1,50 x 2,60)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00) m, (2,00 x 2,00) m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

COM ADESIVO E COM JANELA – (0,30 x 0,30)m – (0,40 x 0,40)m – (0,75 x 0,75)m, (0,90 x 0,90)m, (1,50 x 1,50)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00)m, (2,00 x 2,00)m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

COM ADESIVO E SEM JANELA – (0,90 X 0,90)m - (1,00 x 1,00)m, (1,50 x 1,50)m, (1,50 x 1,80)m, (1,50 x 2,60)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00) m, (2,00 x 2,00)m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

OFTÁLMICO – (0,30 X 0,30)m - (0,40 x 0,40)m – (0,75 x 0,75)m, (0,90 x 0,90)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00)m, (2,00 x 2,00) m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

COBERTURA PARA MESA AUXILIAR – (0,60 x 1,40)m, (1,00 x 1,00)m, (1,50 x 1,50)m, (1,50 x 1,80)m, (1,50 x 2,60)m, (1,10 x 1,20)m, (2,00 x 1,5)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00) m, (2,00 x 2,00) m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

COBERTURA PARA MESA DE MAYO – (0,60 X 1,40)m, (1,00 x 1,00)m, (1,50 x 1,50)m, (1,50 x 1,80) m, (1,50 x 2,60)m, (1,10 x 1,20)m, (2,00 x 1,5)m, (1,00 x 1,40)m, (1,00 x 1,20)m, (1,00 x 1,30)m, (1,30 x 1,30)m, (1,40 x 1,40)m, (1,30 x 1,60)m, (1,00 x 1,00) m, (2,00 x 2,00) m, (0,70 x 0,70)m, (0,80 x 0,80)m.

FINALIDADE

O **CAMPO CIRÚRGICO OFTMED** é indicado para uso em cirurgias em geral para revestir as mesas cirúrgicas e o paciente durante a realização de um procedimento cirúrgico.

VANTAGENS

O uso do CAMPO CIRÚRGICO facilita a rotina hospitalar do centro de materiais.

Evita contaminações e previne a disseminação de infecções hospitalares.

INSTRUÇÕES DE USO

Selecionar a dimensão e o modelo do CAMPO CIRÚRGICO OFTMED o mais adequado para o procedimento a ser realizado.

Verificar a integridade da embalagem e a data de validade antes de abrir para utilizar o produto.

Abrir a embalagem do CAMPO CIRÚRGICO OFTMED o mais próximo possível do momento de uso.

Colocar o conteúdo sobre a mesa cirúrgica, auxiliar ou de mayo e abrir o campo de modo a revestir totalmente a área desejada.

A seguir, posicionar o campo cirúrgico do modelo selecionado sobre o paciente deixando a área onde será realizado o procedimento descoberta.

Ao usar o campo com fenestra e adesivo, a parte adesiva do campo cirúrgico deve ser fixada de maneira que a área desejada ocupe uma posição central, posicionando levemente para conseguir a adesão.

Desdobrar o campo de modo a revestir o paciente.

Finalizando o procedimento descartar todos os campos em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES

Verificar sempre antes do uso a integridade da embalagem e a data de validade do produto.

Estétil. Esterilizado por óxido de etileno ou raios gama.

Artigo Médico-Hospitalar de uso único. É proibido reprocessar.

Conservar em local fresco e seco a temperatura ambiente.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se a embalagem estiver aberta, molhada ou danificada.

Fabricado por:

Oft Vision Indústria e Comércio Ltda

Rua Imbocuí, 283–Vila Moreira–Tatuapé–São Paulo–SP–CEP: 03088-030

CNPJ: 74.215.013/0001-14 – I.E.: 113.921.713.115 – Indústria Brasileira

Autorização MS Nº M734L7782W3X – Registro Anvisa Nº: 80153650033

Responsável Técnica: Dra. Caroline Teixeira de Barros – CRF/SP Nº 76.207

Sac:+55(11)2092-7023–www.oftvision.com.br–contato@oftvision.com.br