

CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED

DESCRIÇÃO

O **CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED** é acondicionado unitariamente em uma embalagem de papel grau cirúrgico e filme termoselada. A embalagem de transporte é uma caixa de papelão contendo múltiplos de 01 (uma) unidade conforme solicitação.

COMPOSIÇÃO

Tecido não tecido formado por fibra de polipropileno 100% impermeável e absorvente, com gramatura entre 20 a 60 g/m².

MODELOS

Campo Cirúrgico - Gramaturas de 20 g/m² até 60 g/m². Dimensões: Comprimento de 0,40m até 2,10m com Largura de 0,40 até 2,10m.

Cobertura de Mesa Auxiliar – Gramaturas de 20 g/m² até 60m/m². Dimensões: Comprimento de 0,40m até 2,10 com Largura de 0,40 até 2,10m.

Cobertura de Mesa Cirúrgica - Gramaturas de 20g/m² até 60 g/m². Dimensões: Comprimento de 0,40m até 2,10m com Largura de 0,40m até 2,10m.

Cobertura para Mesa Mayo - Gramaturas de 20 g/m² até 60 g/m². Dimensões: Comprimento de 0,40m até 2,10m com Largura de 0,40m até 2,10m.

FINALIDADE

O **CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED** é indicado para uso em cirurgias em geral para revestir as mesas cirúrgicas e auxiliares durante a realização do procedimento cirúrgico.

VANTAGENS

O uso o **CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED** facilita a rotina hospitalar do centro de materiais.

Evita contaminações e previne a disseminação de infecções hospitalares.

Resistente a furos e rasgos.

Antialérgico e atóxico.

INSTRUÇÕES DE USO

Selecionar o modelo e dimensão do **CAMPO IMPERMEÁVEL OFTMED** mais adequado para o procedimento a ser realizado.

Verificar a integridade da embalagem e a data de validade antes de abrir e utilizar o produto

Abrir a embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso.

Colocar o conteúdo sobre a mesa cirúrgica, auxiliar ou de Mayo, abrir o campo de modo a revestir totalmente a área desejada.

PRECAUÇÕES

Produto de uso único. É PROIBIDO REPROCESSAR.

Não reutilizar ou reesterilizar.

Não utilizar o produto após o vencimento de seu prazo de validade.

Não utilizar o produto cuja embalagem apresentar sinais de deterioração ou violação, pois a esterilidade não é garantida.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se a embalagem estiver aberta, molhada ou danificada.

CONTRAINDICAÇÃO

Não apresenta contraindicações, desde que seja usado para fins específicos.

Estéril. Esterilizado por óxido de etileno ou raios gama.

ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO. É PROIBIDO PROCESSAR.

Conservar em local fresco e seco à temperatura ambiente.

Fabricado por:

Oft Vision Indústria e Comércio Ltda

Rua Imbocuí, 283–Vila Moreira–Tatuapé–São Paulo–SP–CEP: 03088-030

CNPJ: 74.215.013/0001-14 – I.E.: 113.921.713.115 – Indústria Brasileira

Autorização MS Nº M734L7782W3X - Registro Anvisa Nº: 80153650037

Resp. Técnica: Dra. Caroline Teixeira de Barros –CRF/SP Nº 76.207

Sac: +55 (11)2092-7023 www.oftvision.com.br - contato@oftvision.com.br