

# Injetor descartável

**Para implantação de lente intraocular dobrável OFT VISION**



## INFORMAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO

O Injetor Descartável para Implantação de Lente Intraocular Dobrável OFT VISION é indicado para dobrar e implantar lentes intraoculares dobráveis fabricadas pela OFT VISION em olhos submetidos a facectomia.

## ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**Princípio de funcionamento:** É colocada a lente no cartucho e que esta é dobrada em seguida o mesmo é encaixado no injetor, onde através da ponta de silicone, a lente é empurrada até o local desejado.

### **Modelos:**

INJETOR 3.2  
INJETOR 2.8  
INJETOR MICRO

**Acessórios:** Cartucho e ponteira de silicone

### **Apresentações:**

- O Injetor Descartável para Implantação de Lente Intraocular Dobrável OFT VISION é apresentado embalado individualmente em estojo ou envelope plástico tipo grau cirúrgico, contendo em cada envelope um cartucho e um injetor. Cada embalagem vem acompanhada de uma instrução de uso.
- A empresa disponibiliza como acessórios somente o cartucho e a ponteira de silicone, embalados em papel grau cirúrgico, esterilizados por ETO (óxido de etileno), para aqueles que possuem injetor próprio.
- As etiquetas externas contêm o código e descrição do produto assim como outras informações como lote, data de fabricação e data de validade do produto, conforme determina a legislação sanitária.

**O produto é fornecido estéril, esterilizado por ETO, não devendo ser reesterilizado**

### **Modo de usar:**

- Retirar o sistema de embalagem, conforme técnica asséptica.
- Verifique se a ponteira de silicone está fixada ao êmbolo. Caso não esteja, fixe-a ao êmbolo.
- Abra o cartucho totalmente.
- Injete pequena quantidade de viscoelástico nas duas canaletas existentes no cartucho.
- Injete o viscoelástico em toda extensão do tubo do cartucho.
- Coloque a lente intraocular dobrável OFT VISION com a primeira alça no sentido anti-horário, o mais próximo possível do tubo do cartucho, a uma posição 90°.
- Com uma pinça de pontas arredondadas, empurre as bordas da lente para baixo, encaixando-as nas canaletas.
- Empurre para baixo, com a pinça, o centro óptico da lente.
- Posicione a primeira alça da lente para dentro do tubo do cartucho.
- Posicione a segunda alça da lente para o centro da parte óptica e ao mesmo tempo feche as asas do cartucho, tomando cuidado para que a segunda alça se mantenha no centro da parte óptica.

- Certifique-se que a lente está dobrada dentro das canaletas, a primeira alça posicionada dentro do tubo do cartucho e a segunda alça posicionada no meio da dobra da parte óptica da lente.
- Depois de fechar as asas do cartucho, segure-as juntas e introduza no injetor, certificando-se que está bem encaixado.
- Introduza o tubo do cartucho através da incisão, com o bisel voltado para baixo, até o centro das capsulorhexis.
- Após introduzir o tubo do cartucho, gire o injetor posicionando o bisel para cima.
- Empurre lentamente até o final o êmbolo do injetor, verificando o movimento da lente ao sair pelo tubo do cartucho.
- Utilize um gancho através da incisão auxiliar para ajudar no posicionamento da lente no saco capsular.
- Avance o êmbolo do injetor até que a lente seja totalmente liberada dentro do saco capsular.

#### **Condições de Manipulação:**

- O produto é fornecido estéril e não deve ser utilizado se a embalagem estiver molhada, perfurada ou violada.
- A lente deve ser montada no Injetor Descartável para implantação de lentes Dobráveis OFT VISION no momento da inserção. Caso a lente fique dobrada no cartucho por mais de um minuto, repetir o processo de dobra da lente.
- Siga corretamente as instruções para montagem da lente no cartucho, evitando danificar a mesma.
- Caso o sistema caia no chão ou toque em algum produto, deverá ser descartado conforme as normas para resíduos de estabelecimentos de saúde.

#### **Advertências e/ou precauções:**

- O produto deve ser utilizado apenas para implantar lentes intraoculares dobráveis OFT VISION.
- Todos os constituintes do sistema são de uso único. Não devem ser reesterilizados.
- Não utilizar o cartucho se a ponta estiver rachada ou danificada.
- Utilize sempre viscoelástico para proceder a montagem da lente intraocular dobrável no cartucho.
- Utilize sempre este produto com lentes intraoculares dobráveis que sejam fabricadas pela OFT VISION

#### **Estocagem**

- Armazene o dispositivo em local fresco, seco e limpo, longe de vapores orgânicos e ao abrigo de luz solar direta.

#### **Transporte**

- O transporte deve ser efetuado nas mesmas condições que o armazenamento.

#### **Descarte**

- Produto de uso único, após a utilização deverá ser descartado conforme as normas para resíduos de estabelecimentos de saúde.

**ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL APÓS O USO.**

**Lote, data de fabricação e data de validade VIDE EMBALAGEM**

#### ***Oft Vision Indústria e Comércio Ltda.***

Rua Imbocuí, 279/283 - Vila Moreira - Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03088-030

CNPJ 74.215.013/0001-14 - I.E. 113.921.713.115 - Indústria Brasileira

Autoriz./MS Nº M734L7782W3X - Registro ANVISA nº 80153650024

Resp. Técnica: Dra. Caroline Teixeira de Barros - CRF/SP Nº 76.207

SAC: +55 (11) 2092-7023 - [www.oftvision.com.br](http://www.oftvision.com.br)

E-mail: [contato@oftvision.com.br](mailto:contato@oftvision.com.br)

