

OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA

DESCRIÇÃO

O **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** é uma solução salina balanceada que é utilizada pelos oftalmologistas para irrigação intra-ocular durante cirurgias oftálmicas tais como catarata, glaucoma, vitrectomias e outras.

COMPOSIÇÃO

Cloreto de sódio – 0,64%

Cloreto e potássio – 0,075%

Cloreto de cálcio – 0,048%

Cloreto de magnésio – 0,03%

Acetado de sódio – 0,39%

Citrato de sódio – 0,17%

Água destilada qsp – 10ml

APRESENTAÇÃO

O **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** é apresentado em frascos com volumes de 50ml, 100ml, 250ml, 500ml e 1000ml – Embalagens com 1, 5, 10 unidades.

O **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** é apresentado em bolsa plástica de PVC atóxico com volumes de 50ml, 100ml, 250ml, 500ml e 1000ml – embalagens com 1, 5 e 10 unidades.

FINALIDADE

OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA é uma solução salina balanceada que é utilizada pelos oftalmologistas para irrigação intra-ocular durante cirurgias oftálmicas tais como catarata, glaucoma, vitrectomias e outras.

OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA não tem ação farmacológica e é usada também na irrigação e lavagem do sistema lacrimal, irrigação após o uso de fluoresceína visando à remoção da fluoresceína e também para a irrigação quando da retirada de corpos estranhos no saco conjuntival.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conectar o frasco-soro a um equipo comum para administrar soluções parenterais.
2. Verificar a integridade da embalagem do equipo e seguir as instruções de uso do fabricante.
3. Conectar uma agulha ou cânula de irrigação atraumática na parte terminal do equipo.
4. Deixar o líquido fluir e remover qualquer ar remanescente antes do início do procedimento de irrigação.
5. Regular o fluxo de solução de acordo com os dispositivos presentes no equipo (roletes, pinças, etc).
6. Realizar o procedimento de irrigação.
7. Ao final do procedimento descartar qualquer porção de **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** não utilizada.

TEMPO DE PERMANÊNCIA

O **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** não permanece na mucosa ocular, pois o seu uso é para irrigação da mucosa, ou seja, para remover a hidroximetilcelulose (cirurgia dura cerca de uma hora) e a solução de fluoresceína (o exame dura cerca de 5 minutos). Não existe nenhum tipo de perigo de superdosagem, pois é uma solução com características fisiológicas de pH semelhantes à lágrima.

PRECAUÇÕES

- **NÃO UTILIZAR NUNCA COMO INFUSÃO ENDOVENOSA.**
- **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** só pode ser utilizada se a solução estiver incolor, transparente, com presença de vácuo na embalagem.
- Adotar técnicas assépticas quando da instalação da irrigação.
- Este produto não tem ação farmacológica. Não adicionar qualquer tipo de medicação ao frasco-soro.
- Não foram relatadas contra-indicações para este produto. Se o endotélio corneal estiver anormal, a irrigação pode causar uma queratopatia bolhosa.
- Ocasionalmente, pode ocorrer visão turva ou edema da córnea após uma cirurgia onde tenha sido utilizado **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA**.

ESTOCAGEM

Estocar em local fresco e seco, a temperatura ambiente ao abrigo da incidência de luz solar direta.

DESCARTE

Descartar qualquer porção remanescente em local apropriado.

Esta solução não tem preservativos e não deve ser usada novamente.

Esterilizado por filtração em membrana e autoclave. Os testes de esterilidade e pirogênio são efetuados de acordo com a Farmacopéia Americana (USP).

ADVERTÊNCIAS

- **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** não apresenta nenhum tipo de efeito colateral desde que seja utilizado por profissional especialista na área de oftalmologia, sob condições assépticas e de acordo com estas instruções de uso.
- O produto **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** é um produto tradicional na área de oftalmologia. Desde que utilizado exatamente para a finalidade a qual se destina e de acordo com as instruções de uso não causa prejuízos ou danos ao seu usuário. Não apresenta uma finalidade terapêutica ou curativa.
- **OFTSOL SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA** é um correlato que só deve ser utilizada por oftalmologistas com experiência em cirurgias oftálmicas.

Uso exclusivo em irrigação intra-ocular. Esterilizado por autoclave a vapor.

“Artigo médico hospitalar de uso único. DESCARTAR APÓS O USO”.

Fabricado por:

Oft Vision Indústria e Comércio Ltda

Rua Imbocuí, 283–Vila Moreira–Tatuapé–São Paulo–SP–CEP: 03088-030

CNPJ: 74.215.013/0001-14 – I.E.: 113.921.713.115 – Indústria Brasileira

Autorização MS Nº M734L7782W3X - Registro Anvisa Nº: 80153650023

Resp. Técnica: Dra. Caroline Teixeira de Barros – CRF/SP Nº 76.207

Sac: +55(11) 2092-7023 www.oftvision.com.br – contato@oftvision.com.br