

Azul de trypan

Trypan blue

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Ofttrypan é utilizado em cirurgias oftálmicas. É indicado em capsulotomia para a retirada do cristalino na cirurgia de catarata. O corante Azul de Trypan cora a cápsula (que é transparente), para um tom levemente azulado, facilitando a sua visualização durante o ato cirúrgico.

ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Ofttrypan é composto por uma solução aquosa de corante Azul de Trypan a 0,1% e 0,25%.

0,1%

Corante Azul Trypan (CI 23850) 0,1g - Água destilada qsp 100ml.

0,25%

Corante Azul Trypan (CI 23850) 0,25g - Água destilada qsp 100ml.

Ofttrypan é apresentado conforme a seguir:

- Ofttrypan** 0,1% frasco - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,1% frasco-ampola - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,1% ampola - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,1% seringa - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,25% frasco - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,25% frasco-ampola - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,25% ampola - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml
- Ofttrypan** 0,25% seringa - 1ml, 2ml, 5ml e 10ml

Esterilizado por autoclave a vapor. Os testes de esterilidade e pirogênio são efetuados de acordo com a Farmacopéia Americana (USP) e Brasileira.

As embalagens primárias são colocadas em uma embalagem formada por Tyvek e polímero plástico termoselado e posteriormente esterilizados por óxido de etileno.

PRINCÍPIO DO MÉTODO:

O corante Azul de Trypan é um corante vital que cura células degeneradas e desvitalizadas. A impregnação ocorre quando seus grupos ácidos se ligam a grupos alcalinos do tecido. A coloração pelo Azul de Trypan persiste entre 20 a 60 minutos e, pelo fato de ser pouco tóxico, já foi utilizado em avaliações de endotélio corneano doador.

ORIENTAÇÕES SUFICIENTES E ADEQUADAS PARA O USO OU APLICAÇÃO CORRETA E SEGURA DO PRODUTO:

Modo de usar: **Ofttrypan** pode ser administrado por injeção intra-ocular e topicamente.

1. Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto.
2. Adotar a técnica asséptica quando da aplicação da injeção intra-ocular.
3. A dose necessária para a realização da injeção é determinada pelo cirurgião, pois conforme o caso é estabelecida a quantidade a ser administrada.

Modo de usar: (seringa)

1. Abrir a embalagem do produto em campo estéril na sala de cirurgia.
2. Verificar a integridade da embalagem da cânula que será acoplada a seringa que contém o **Ofttrypan**.
3. Retirar todo o ar da seringa pressionando o êmbolo, de modo que surja na ponta da cânula a primeira gota do produto.
4. Injetar o produto de acordo com os procedimentos padronizados.
5. Ao final do procedimento descartar qualquer porção de **Ofttrypan** não utilizada.

Modo de usar: (frasco-ampola, ampola)

1. Abrir a embalagem do produto em campo estéril na sala de cirurgia.
2. Verificar a integridade da embalagem da cânula que será utilizada para aplicação do produto.
3. Retirar todo o conteúdo do frasco-ampola através da aspiração com o conjunto agulha-seringa.
4. Remover todo o ar da seringa pressionando o êmbolo, de modo que surja na ponta da cânula a primeira gota do produto.
5. Injetar o produto intraocularmente de acordo com procedimentos padronizados, de modo a alcançar a situação desejada para as manobras cirúrgicas.
6. Ao final do procedimento descartar qualquer porção de **Ofttrypan** não utilizada.

Modo de usar: (frasco)

1. Abrir a embalagem do produto em campo estéril na sala de cirurgia.
2. Pingar a quantidade de gotas necessárias para a coloração.
3. Descartar o remanescente do produto em local apropriado. Não reutilizar.

As precauções, os cuidados especiais e os esclarecimentos sobre os riscos possíveis com o uso ou aplicação do produto, bem como os cuidados especiais na armazenagem e transporte.

1. NÃO UTILIZAR "NUNCA" COMO INJEÇÃO PARENTERAL.
2. Não utilizar **Ofttrypan** após haver expirado o seu prazo de validade.
3. Este produto não tem ação farmacológica.
4. O **Ofttrypan** só deve ser utilizado por cirurgiões oftalmológicos com ampla experiência nos procedimentos relacionados com o uso do produto.

ESTOCAGEM:

Estocar em local fresco e seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da incidência de luz solar direta.

DESCARTE:

Descartar qualquer porção remanescente em local apropriado. Esta solução não tem preservativos e não deve ser usada novamente.

BIBLIOGRAFIA:

1. ABPI DATA SHEET COMPENDIUM, 1989-1990, Datapham Publications Limited - 12 Whitehall, London SW 1A 2DY.
2. Martindale, The Extra Pharmacopeia, 31th ed., 1982, The Pharmaceutical Press, London.
3. Oscl. Arthur- Remington's Pharmaceutica Sciences, 16th ed., 1982, Mack Publishing Co. Pennsylvania, USA.
4. The Marck Index, 11th ed, Merck Co Rahway, New Jersey, USA.
5. Vaughan, D; Taylor, A - Oftalmologia Gera, 2ª Edição, Atheneu Editora São Paulo Ltda, 1983.

USO EXCLUSIVO INTRAOCULAR

"ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO"

Oft Vision Indústria e Comércio Ltda.

Rua Imbocuí, 279/283 - Vila Moreira - Tatuapé - São Paulo - SP - CEP 03088-030

CNPJ 74.215.013/0001-14 - I.E. 113.921.713.115 - Indústria Brasileira

SAC: +55 (11) 2092-7023 - Autoriz./MS Nº M734L7782W3X

Registro ANVISA nº 10291980017 - Resp. Técnica: Dra. Caroline Teixeira de Barros - CRF/SP Nº 76.207

www.oftvision.com.br - E-mail: contato@oftvision.com.br

