

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE USO



*Oft Vision*<sup>®</sup>

FABRICADO POR:

OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RUA IMBOCÚI, 283 - VILA MOREIRA / TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP

CEP: 03088-030 - BRASIL - INDÚSTRIA BRASILEIRA

GNPJ: 74.215.013/0001-14 - I.E.: 113.921.713.115

AUT. MS: M734L7782W3X

RESP. TÉCN: DRA. CAROLINE TEIXEIRA DE BARROS - CRF Nº 76.207


SAC: +55 (11) 2092-7023

SITE: WWW.OFTVISION.COM.BR

E-MAIL: CONTATO@OFTVISION.COM.BR

REG. ANVISA: 80153659001

## RETRATOR DE ÍRIS

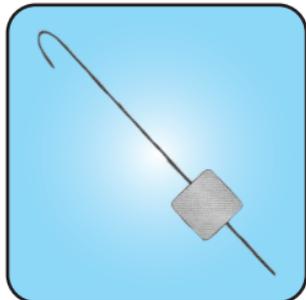

## RETRATOR DE ÍRIS

**Apresentação:**

Cada cartucho contém 01 (um) conjunto com 05 (cinco) unidades de Retratores de Íris, estéril.

**Descrição/Indicações:**

Retrator de Íris Oft Vision consiste de um gancho flexível de PMMA, com trava de silicone para fixação temporária da íris durante a cirurgia. Nos casos em que a dilatação não pode ser obtida farmacologicamente, o Retrator de Íris Oft Vision é uma alternativa simples, rápida e segura para a dilatação temporária da íris.

**Contra-indicações:**

Não deve ser utilizado em pacientes com irite.

**Instruções de Uso:**

**Introdução do Retrator:** Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica; Retirar a quantidade necessária para o procedimento; A córnea deve estar transparente para controlar o posicionamento dos Retratores. Segurar o Retrator com um porta-agulhas ou pinça na região próxima ao gancho e introduzi-lo no olho; Girar a pinça de modo que o Retrator possa ser enganchado na borda da íris e retrair o tanto quanto necessário em direção à incisão; Ajustar o Retrator na posição apropriada e tensionar movendo a trava de silicone em direção à córnea.

**Remoção:** Deslizar a trava de silicone para longe da córnea; Desenganchar o Retrator; Remover o Retrator; A extremidade em gancho irá se endireitar e sair pela incisão auto-selante.

**Composição/Dimensões:**

Gancho: PMMA (Polimetilmetacrilato) Grau Médico 10 mm

Trava (Silicone): 0,5 mm

**Advertência: ATENÇÃO:** *Este produto somente poderá ser implantado por cirurgião ocular experiente, com treinamento na técnica de implante deste dispositivo.*

**Precauções:**

- Produto estéril de uso único - não reesterilizar
- Armazenar em local fresco, seco e limpo, longe de vapores orgânicos, à temperatura ambiente e ao abrigo de incidência de luz solar direta.
- Não utilizar se a embalagem apresentar indícios de violação.
- As precauções limitam-se às que normalmente estão associadas ao procedimento que está para ser praticado.

OBS.: Oft Vision não assume qualquer responsabilidade por complicações que possam surgir como resultado da reutilização ou uso impróprio do produto.

- Esterilizado por Óxido de Etileno.

**CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, À TEMPERATURA AMBIENTE E AO ABRIGO DE INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR DIRETA**

**CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE: Vide cartucho