
	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>	
	<b>FICHA TÉCNICA – CAMPO CIRÚRGICO COM ADESIVO E FENESTRA</b>	Revisão 00
		Página 1 de 2

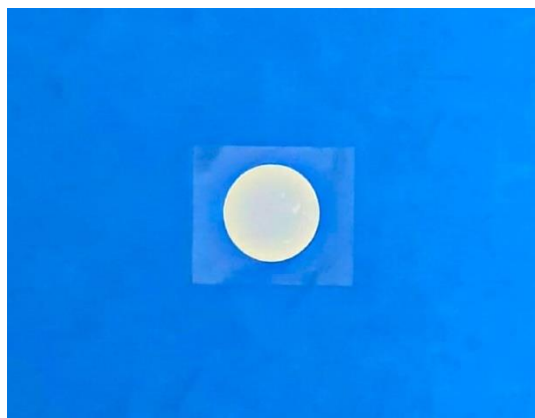


#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO	APRESENTAÇÃO
CAMPO CIRÚRGICO OPTMED	Campo Cirúrgico com Adesivo e Fenestra
REGISTRO	CLASSE
80153650033	I

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TESTE	ESPECIFICAÇÃO	REFERÊNCIA
Material	Tecido não tecido SMS spunbond-meltblown-spunbond 100% polipropileno	Interna
Cor	Azul	Interna
Comprimento	Conforme necessidade do cliente	Interna
Largura	Conforme necessidade do cliente	Interna
Fenestra	Diâmetro de 90 mm	Interna
Adesivo	Fita hipoalergênica	Interna
Gramatura	42,8 – 47,3 g/m <sup>2</sup>	Fornecedor
Espessura	0,15 – 0,35 mm	Interna
Indicador biológico	Controle negativo – Cor roxa Controle positivo – Cor amarela	ISO 11135 - esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno
Integrador químico	Nível 1 – Cor amarela Nível 2 – Cor verde	ISO 11135 - esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno
Residual de Óxido de Etileno	< 25 ppm	Port. Interminist. N°482/99
Esterilidade	Estéril	Farmacopeia Brasileira 6ª edição – 2019

	<b>Sistema de Gestão da Qualidade</b>	
	<b>FICHA TÉCNICA – CAMPO CIRÚRGICO COM ADESIVO E FENESTRA</b>	Revisão 00
		Página 2 de 2

### Indicação

O **CAMPO CIRÚRGICO COM ADESIVO E FENESTRA** é indicado para uso em cirurgias em geral, para revestir o local próximo a área em que será realizado o procedimento cirúrgico.

### Composição

Tecido não tecido formado por fibras de polipropileno 100%, com gramatura 45 g/m<sup>2</sup>.

### Vantagens

- O uso do **CAMPO CIRÚRGICO COM ADESIVO E FENESTRA** facilita a rotina hospitalar do centro de materiais.
- Evita contaminações e previne a disseminação de infecções hospitalares.
- Resistente a furos e rasgos.
- Antialérgico e atóxico.

### Instruções de uso

- Verificar a integridade da embalagem e a data de validade antes de abrir para utilizar o produto.
- Abrir a embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso.
- Colocar o conteúdo sobre a mesa cirúrgica, auxiliar ou de Mayo, abrir o campo de modo a revestir totalmente a área desejada.
- Finalizado o procedimento descartar todos os campos em local apropriado para materiais potencialmente contaminados

### ADVERTÊNCIA E/OU PRECAUÇÕES

- Produto de uso único. É PROIBIDO REPROCESSAR.
- Não reutilizar ou reesterilizar.
- Não utilizar o produto após o vencimento de seu prazo de validade.
- Não utilizar o produto cuja embalagem apresentar sinais de deterioração ou violação, pois nestes casos a esterilidade não é garantida.

### HISTÓRICO

Revisão	Motivo	Data
Revisão 00	Emissão inicial	01/03/2024